





Cómo actualizar la librería de implantes 3DBiotech en exocad

En esta dirección dispone de un video explicativo. Solo tiene que clicar. <https://youtu.be/iNYOrZeRGI>


1. Diríjase a Mi Equipo y seleccione “Disco Local (C:)”

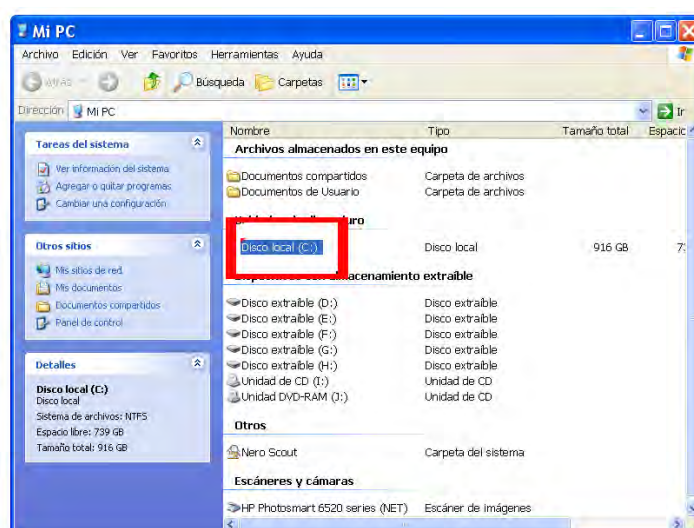


2. Haga clic en “Archivos de Programa x86”

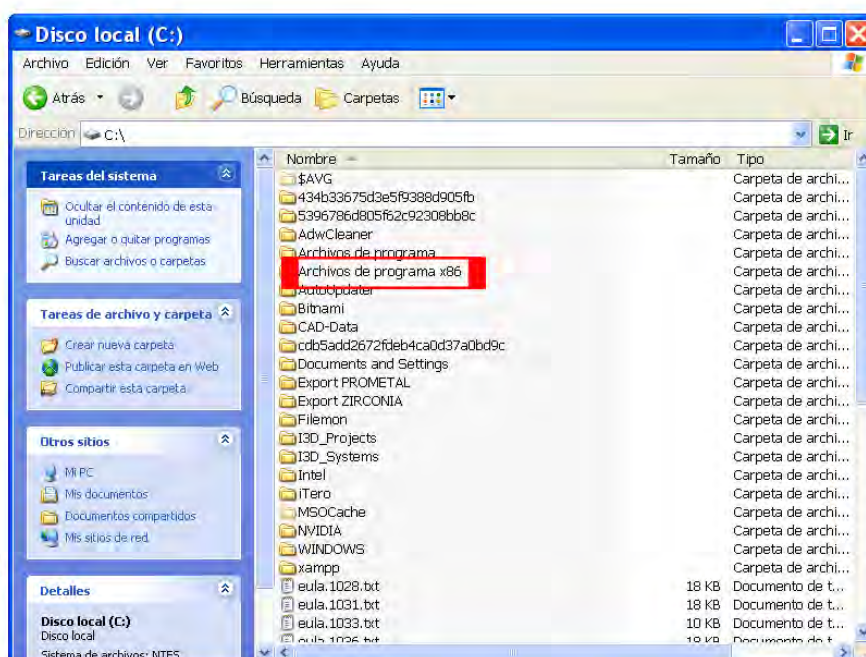


3. A continuación en la carpeta “ExocadFramework”

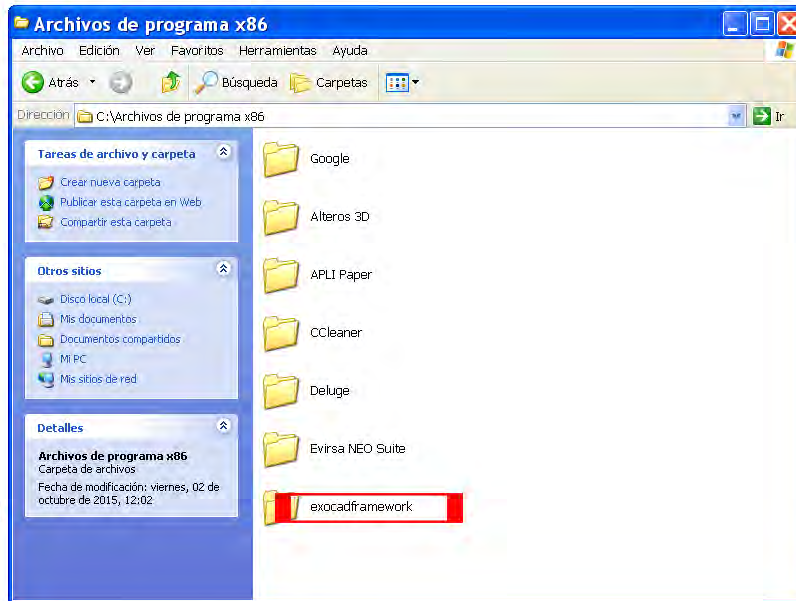


4. De nuevo clique en la carpeta “DentalCadApp”

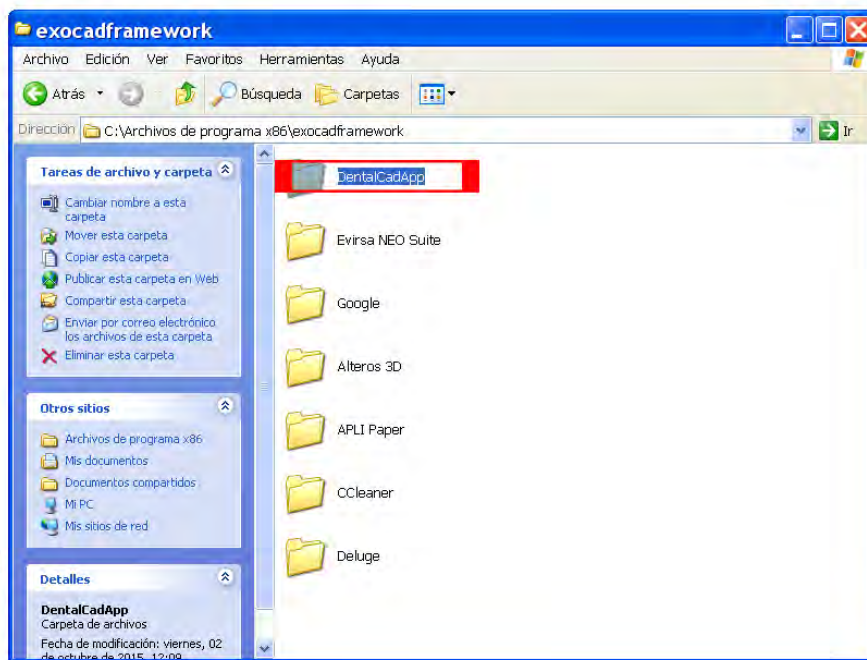


5. Ahora sobre la carpeta "library"

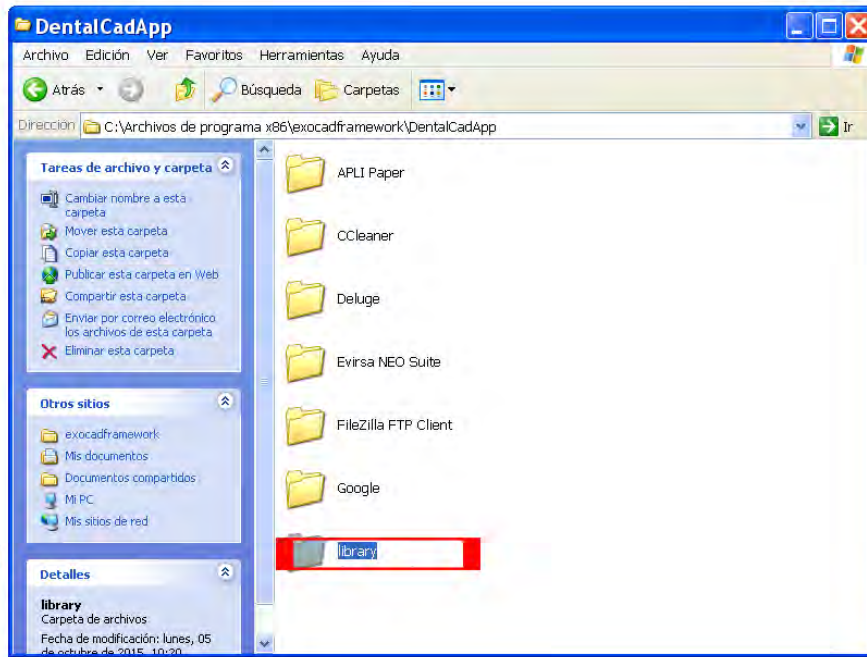

6. Y seguidamente en la carpeta "implant"

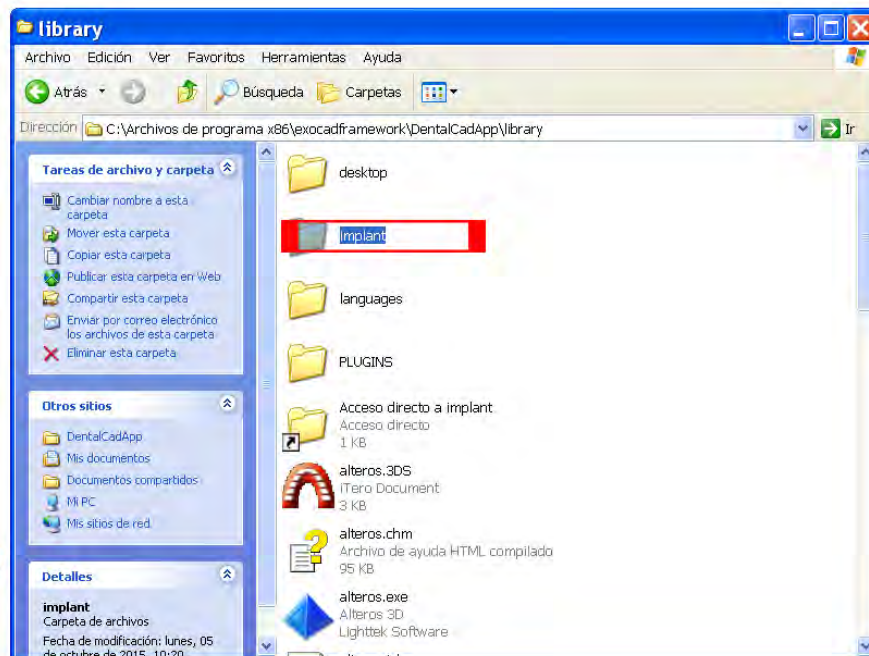

7. Dentro de la carpeta "implant" **BORRE** aquellas carpetas que desee actualizar. En nuestro ejemplo "Mis Ibérica 3.5"

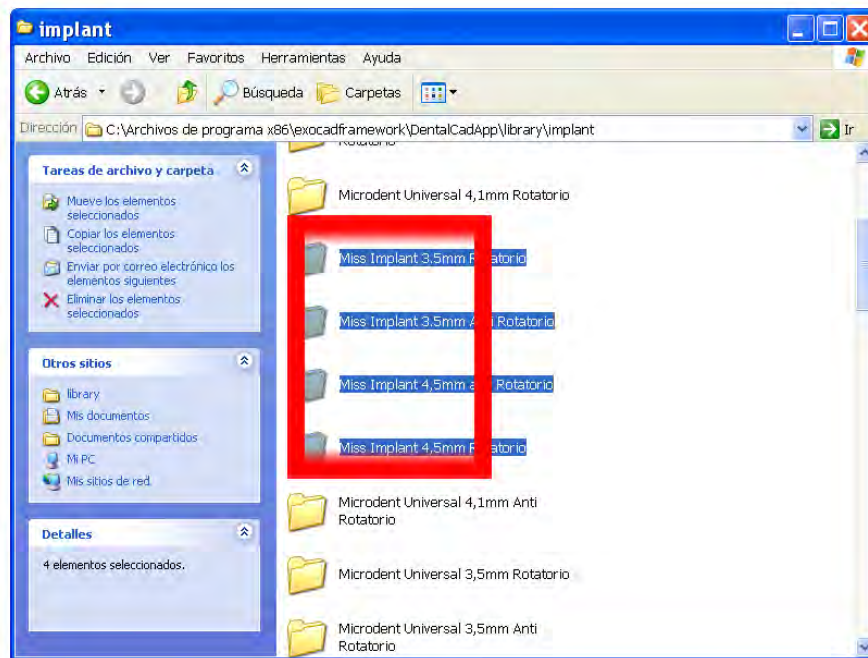

8. Ahora copie desde nuestra librería las carpetas del ejemplo "Mis Ibérica" a dónde borró las antiguas.

